

Di-Mill HYDRA

Gocce oculari

Di-Mill Hydra è una soluzione sterile ad uso oftalmico, con pH fisiologico. L'azione principale del dispositivo è di lubrificare e idratare la superficie oculare, grazie al sodio ialuronato e all'ipromellosa.

Di-Mill Hydra è indicato per il sollievo di rossore, fatica, discomfort e secchezza oculare. Il sodio ialuronato è utilizzato per la sua azione idratante e lubrificante, che contrasta la secchezza oculare e crea un film che protegge l'epitelio corneale dagli agenti ambientali. L'ipromellosa è un polimero con proprietà muco-mimetiche in grado di stabilizzare il film lacrimale sulla superficie della cornea creando uno scudo protettivo, trasparente e viscoelastico. Il sodio ialuronato è una molecola già naturalmente presente nel corpo umano dove è necessaria una costante lubrificazione (come la cartilagine, la pelle, il film lacrimale) e quindi biocompatibile. Questo lubrificante, insieme all'ipromellosa, offre un'idratazione intensa e duratura sulla superficie oculare.

I lubrificanti attirano e trattengono l'acqua dall'ambiente e formano uno scudo lubrificante sulla superficie dell'occhio. Poiché questo scudo viscoso rilascia progressivamente l'acqua, Di-Mill Hydra fornisce un'idratazione prolungata degli occhi.

Inoltre, Di-Mill Hydra contiene cloruro di sodio e tampone borato per garantire una soluzione fisiologica e acque distillate di rosa canina, aloe, camomilla e mirtillo per assicurare un'azione idratante.

Di-Mill Hydra non contiene conservanti o tamponi fosfato.

Di-Mill Hydra è compatibile con lenti a contatto.

INDICAZIONI D'USO

Di-Mill Hydra svolge un'azione idratante e lubrificante sulla superficie oculare, alleviando arrossamenti, affaticamento e discomfort degli occhi e della mucosa oculare causati da fattori ambientali (vento, fumo, inquinamento, esposizione prolungata ai raggi solari, sale marino e acqua) e dall'uso prolungato del computer; agisce inoltre contro la sindrome dell'occhio secco.

Assicura anche il sollievo dallo stress oftalmi-

co dovuto all'uso di lenti a contatto e alla chirurgia a livello della superficie oculare.

Inoltre, il collirio ha una viscosità ottimale che rende il dispositivo particolarmente utile per facilitare l'applicazione o la rimozione delle lenti a contatto, evitando fastidiosi fenomeni di arrossamento degli occhi, soprattutto negli adulti in cui può verificarsi più facilmente uno squilibrio del film lacrimale.

COMPOSIZIONE

0,2% sodio ialuronato, 0,2% ipromellosa (HPMC), acqua distillata di Rosa canina (*Rosa canina*), acqua distillata di Aloe (*Aloe barbadensis Miller*), acqua distillata di Camomilla (*Chamomilla recutita*), acqua distillata di Mirtillo (*Vaccinium myrtillus*), acido borico, sodio tetraborato decaidrato, sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili.

ISTRUZIONI D'USO



- Lavare e asciugare accuratamente le mani prima dell'uso;
- Strappare il sigillo antimanomissione prima della prima somministrazione;
- Rimuovere il cappuccio di protezione;
- Premere il contenitore e instillare nell'occhio 2 o 3 gocce di Di-Mill Hydra; non applicare più di 10 dosi (2-3 gocce per occhio) al giorno;
- Dopo aver erogato la prima goccia aspettare qualche secondo prima di schiacciare nuovamente la bottiglia. Questo permetterà all'aria di ritornare nel sistema facilitando l'erogazione della goccia successiva;
- In ragione delle caratteristiche intrinseche del flacone con erogatore per soluzioni senza conservanti, al progressivo svuota-

- mento del flacone potrebbe essere necessario esercitare una pressione maggiore per consentire la fuoriuscita del prodotto. Una piccola quantità di soluzione rimane sempre all'interno del flacone;
- Se si ritiene di aver mancato l'occhio, somministrare un'altra goccia;
- Ripetere il procedimento per l'altro occhio, se necessario;
- Dopo l'uso agitare il flacone per rimuovere l'eventuale prodotto in eccesso prima di riposizionare il tappo sul contenitore;
- Dopo l'uso richiudere immediatamente il flacone con il tappo;
- Se, dopo l'uso, il flacone risultasse schiacciato, attendere che ritorni nella forma originale prima di chiuderlo con l'apposito tappo;
- Non toccare la punta dell'applicatore, nemmeno con gli occhi o le dita;
- Il prodotto può essere riutilizzato entro 3 mesi dalla prima apertura;
- Di-Mill Hydra può essere utilizzato con lenti a contatto.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

- Il prodotto contiene le seguenti sostanze CMR in concentrazioni superiori a 0,1% p/p: acido borico e sodio tetraborato decaidrato. Il prodotto non è indicato per bambini, donne in gravidanza o in allattamento.
- Subito dopo l'applicazione, si potrebbe verificare un blando offuscamento della vista. Possono altresì verificarsi temporaneamente lievi bruciori/pizzicore/irritazioni come risultato dell'irritazione degli occhi. Se uno qualsiasi di questi effetti persiste o peggiora, informare immediatamente il medico.
- Il prodotto è solo per uso oftalmico esterno.
- Il prodotto è monopaziente.
- Non utilizzare il prodotto se il contenitore risultasse, al momento della prima apertura, danneggiato o non perfettamente chiuso.
- Non utilizzare il prodotto se si osservano particelle e/o alterazioni del colore della soluzione.
- Durante l'applicazione non toccare l'occhio né alcuna altra superficie con l'estremità di erogazione del contenitore.
- Non usare in caso di nota incompatibilità verso qualsiasi componente della preparazione e/o in caso di allergie alle piante della famiglia delle Asteraceae e/o Liliaceae e/o Ericaceae e/o Rosaceae.

- Non sono riportate interazioni con farmaci o altri colliri; attendere comunque 15 minuti prima di instillare qualsiasi altra goccia oculare.
- In caso di disturbi durante l'uso sospendere il trattamento e consultare un medico.
- Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
- Smaltire il prodotto in accordo alla normativa locale sui rifiuti.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Per uso esterno. Non ingerire.
- Non cercare di svitare o manomettere l'erogatore del flacone.
- Segnalare qualsiasi incidente grave, verificatosi in relazione al dispositivo, al fabbricante e all'autorità competente dello stato membro in cui l'utilizzatore è stabilito.

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO

Conservare a temperatura inferiore a 30 °C. Il contenuto del flacone può essere riutilizzato entro 3 mesi dalla prima apertura.

EFFETTI COLLATERALI


Al momento non sono noti effetti collaterali.


CONFEZIONAMENTO

Un flacone da 10 ml di soluzione sterile senza conservanti.

VALIDITÀ

A confezione integra non superare la data di scadenza riportata sulla confezione e sul flacone.

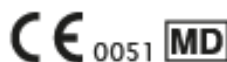

 C.O.C. Farmaceutici S.r.l.
Via Modena, 15 - 40019
Sant'Agata Bolognese (BO) - Italia

DISTRIBUTORE

Laboratorio Farmaceutico SIT S.r.l.
Via Cavour, 70 - 27035 Mede (PV) - Italia



Laboratorio
Farmaceutico

Ultima revisione 02.01 del 10/2022