

ISTRUZIONI PER L'USO

# FOMENTIL

## COMPRESSE PER SUFFUMIGI

### CARATTERISTICHE

FOMENTIL è un dispositivo medico da somministrare per via inalatoria sotto forma di suffumigi.

La sua azione è utile a liberare le vie respiratorie in condizioni quali gola irritata, raffreddamento, irritazioni acute o croniche, in presenza di ipersecrezione della mucosa.

Il prodotto pertanto è da utilizzare come coadiuvante a tutti i trattamenti volti a ripristinare il funzionamento delle vie respiratorie.

### DESTINAZIONE D'USO

FOMENTIL aiuta a liberare le vie respiratorie, favorisce la protezione della mucosa nasale ed oro-faringea e la fluidificazione e la rimozione delle secrezioni catarrali successivamente espulse tramite il fisiologico meccanismo della tosse.

Il vapore acqueo generato dal suffumigio, in presenza di mentolo ed eucalipto, contribuisce a decongestionare le vie respiratorie donando sollievo in condizioni quali raffreddore, tosse, sinusite, bronchite e infiammazioni dell'apparato respiratorio.

### MODALITÀ D'USO

Sciogliere 1-2 compresse in mezzo litro circa di acqua bollente e respirare per 3-4 minuti i vapori raccogliendoli per mezzo di apposito vapo-inalatore o con le mani.

Ripetere tale operazione 3-4 volte al giorno.

Occorre che l'acqua sia bollente perché la compressa si dissolva completamente. Spezzare le compresse per facilitare la loro dissoluzione. Non coprirsi il capo con un panno durante l'inalazione e avere l'avvertenza di tenere il viso a una distanza di circa 40 cm per evitare che il vapore acqueo caldo irri la pelle.

Per bambini al di sopra dei 30 mesi: mettere vicino al letto del bimbo un catino con l'acqua bollente e sciogliervi 3-4 pastiglie, una alla volta.

La durata del trattamento dei suffumigi non dovrebbe superare i 3 giorni.



Cod. 303511 Ver.8

### AVVERTENZE E PRECAUZIONI

Non utilizzare se la confezione è aperta o danneggiata.

Il prodotto non deve essere usato per bambini sotto ai 30 mesi di età.

Non somministrare in caso di ipersensibilità già nota verso i componenti.

Per uso esterno, non ingerire le compresse né bere la soluzione. Utilizzare solo per suffumigi ed inalazioni. Evitare il contatto con gli occhi.

Non sono note interazioni con altri prodotti e/o medicinali, tuttavia in caso di terapia concomitante per le vie respiratorie, attendere almeno 30 minuti tra l'uso di FOMENTIL e l'altro trattamento.

FOMENTIL non è raccomandato durante la gravidanza e in donne in età fertile che non usano misure contraccettive. FOMENTIL non deve essere utilizzato durante l'allattamento.

È importante segnalare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati.

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini e da chi può accidentalmente ingerire la compressa o la soluzione.

Non deve essere utilizzata una dose superiore a quella raccomandata.

Consultare il medico se si soffre di patologie respiratorie croniche.

### CONSERVAZIONE

Conservare il prodotto nella confezione originale, al riparo dalla luce diretta e dal calore, a temperatura ambiente.

Richiudere il tubo dopo l'uso; usare entro 18 mesi dalla prima apertura.

Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. La data di scadenza si riferisce al prodotto integro, correttamente conservato.

Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE E COMPOSIZIONE

Tubo da 10 compresse.

Una compressa contiene: sodium bicarbonate, tartaric acid, microcrystalline cellulose, bentonite, glyceryl distearate, silica colloidal hydrated, polyvinylpyrrolidone, talc, magnesium stearate, flavour (eucalyptus globulus leaf oil, lavandula angustifolia oil, thymus vulgaris flower/leaf oil, menthol).



Laboratorio Farmaceutico SIT S.r.l.  
Via Cavour, 70 - 27035 Mede (PV) - Italia

DISPOSITIVO MEDICO  0051

Data ultima revisione: Luglio 2019



Laboratorio  
Farmaceutico